

Sondeernæring med pumpe

Til de fleste, der får sondeernæring, anbefales ernæringspumpe og ernærings sæt, fordi pumpens indgivelseshastighed og -mængde

kan indstilles. Sondeernæring med Flocare Infinity pumpe er let, sikkert og tidsbesparende.

TILKOBLING VED NY POSE + SÆT

1. 	2. 	3. 
Skrub hættten af flasken med sondemad.	Stil sondeernæringen så adgangsporten vender opad. Skub ernærings sættet helt i bund.	Skrub ernærings sættet fast på flasken med sondemad.
4. 	5. 	6. 
Hæng sondemaden op. Brug evt. et stativ.	Åbn dækslet på pumpen.	Anbring kassetten omkring pumpen.
8. 	9. 	10. 
Luk pumpen.	Tryk på FILL SET på pumpen, og lad sondemaden løbe gennem ernærings sættet.	Fjern beskyttelseshætten fra konnektoren på ernærings sættet.
11. 	12. 	13. 
Skrub ernærings sættet sammen med sondens konnektor. Sørg for ikke at dreje helt i bund!	Tryk på START/STOP på pumpen.	Vælg det ønskede program på pumpen. Se vejledning til pumpen for mere information.
14. 	15. 	16. 
MELLEM MÅLTIDER. Tryk (info) og derefter (clear) på pumpen.	Tryk på START/STOP på pumpen.	Skyl sonden igennem med 20 - 50 ml vand. ALTERNATIVT:

INDTAGELSE AF SONDEMAD

AFKOBLING

17. 	18. 	19. 	20. 
Luk 3-vejshanen op. Pres 20-50 ml vand gennem 3-vejshanen med en sprøjte. Luk 3-vejshanen.	Tag ernærings sættets konnektor fra sondens konnektor, og sæt beskyttelseshætten på sonden.	Sæt hættten på ernærings sættets konnektor.	Sluk pumpen (Tryk på START/STOP) knappen. (Pumpen husker dine data til næste måltid).

SONDEN SKYLLES PÅ EN AF FLG. MÅDER (16 EL. 17)

Sondeernæring med ernærings sæt uden pumpe

1. Skru ernærings sættet på sondeernærings pakningen, som på billede 1-3 i brugsanvisningen til venstre. Spyddet i toppen af ernærings sættet bryder forseglingen, når det trykkes op mod toppen af pakningen.
2. Kontrollér at ernærings sættets klemskrue er lukket.
3. Hæng pakningen op på et dropstativ eller lignende og anvend et Flocare ernærings sæt til gravity/tyngdekraft.
4. Støvhætten for enden af ernærings sættet fjernes og gemmes. Klemskruen åbnes




langsomt, og slangen fyldes med ernæring. Luk for klemskruen.

5. Forbind ernærings sættet med sonden (ved knapsonde; forbind ernærings sættet med forlængerslangen).
6. Start sondeernæringen ved at kontrollere dråbe hastigheden i dråbekammeret og juster ved hjælp af klemskruen.
7. Når måltidet er slut, lukkes klemskruen.


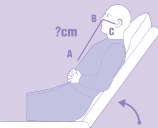
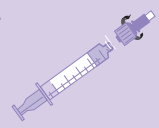

OBS! Husk altid at SKYLLE ernærings sættet efter indgivelse, så det undgås, at ernærings sættet bliver tilstoppet.

Sondeernæring (bolus) med ernærings sprøjte

SONDEERNÆRING - MED ERNÆRINGS-SPRØJTE

1. 	2. 	3. 
Skrub en Flocare Bolus-adaptor på sondeernæringen og ryst emballagen med sondeernæring inden brug.	Skyl sonden igennem med 20-50 ml vand inden sondeernæringen gives.	Sondeernæring bør altid gives tempereret, ikke køleskabskold. Træk den anbefalede mængde sondeernæring op i ernærings sprøjten.

For alle indgivelsesmetoder gælder:

1. 	2. 	3. 	4. 
Sondeernæringen skal gives over et tidsinterval på minimum 20 minutter.	Mens barnet får sondeernæring og 1/2 time efter måltidet, skal overkroppen være løftet 45° - dvs. barnet skal sidde op, ligge med løftet hovedgærd eller være støttet af puder.	Før og efter hvert måltid skylles sonden igennem med 20-50 ml vand og lukkes.	Sondeernæringen sættes tilbage i køleskabet efter brug. Holdbarhed i køleskabet med Bolus adaptor er 24 timer.